



# Note d'information

Numéro de la note d'information	69
Objet	Modification du prélèvement PCR COVID-19
Personnel concerné	Tout le personnel airbio, IDE EHPAD et libérales
Date de diffusion	27/11/20

Afin de faciliter l'analyse, veuillez retirer l'écouvillon du milieu de transport en respectant les indications ci-après :

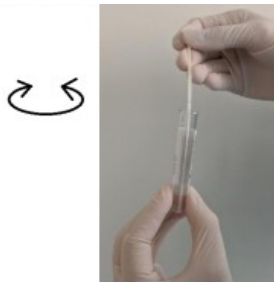

**E** Placer l'écouvillon **au fonds du tube**. Effectuer des mouvements rotatifs contre les parois du tube pendant **15 secondes MINIMUM**, afin de décharger les sécrétions naso-pharyngées dans le milieu de transport.

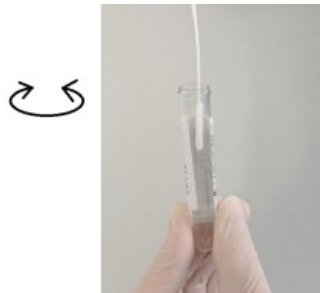

**F** Placer l'écouvillon dans le tube au dessus du milieu de transport. Effectuer des mouvements rotatifs contre les parois du tube pendant environ 5 secondes afin d'essorer la partie floquée de l'écouvillon.



**G** Se placer au dessus de la poubelle DASRI. Retirer délicatement l'écouvillon et le jeter dans le DASRI.  
**IMPORTANT: Utiliser un DASRI de faible contenance et avec couvercle**



**I** Désinfecter l'extérieur du tube au dessus du DASRI avant de placer le tube dans le portoir (ou le sachet si un seul prélèvement effectué)



**H** Désinfecter le couvercle du DASRI avec un désinfectant de surface (type Surfasec, Cidalkan, Phagospore, ...)  
Désinfecter régulièrement votre espace de travail (paillasse)